




COVID-19

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CARETA

El uso de careta aplica cuando no se cumpla con los 2 metros de distanciamiento social.

Recuerda que el lavado y desinfección de la careta debes realizarla mínimo una vez al día.

¡Utiliza siempre tu equipo de protección personal!

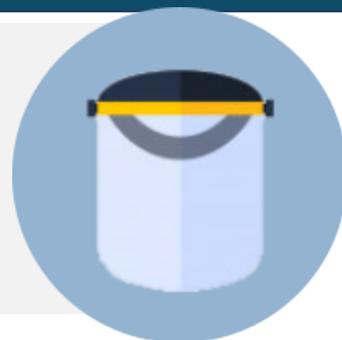

RECOMENDACIONES Limpieza Careta

1

Aplica abundante agua y jabón neutro directamente a la careta. (visor, arnés y cabezal).

2

Nuevamente aplica abundante agua para **retirar el jabón**.

3

Luego, aplica **jabón y cloro (3:1), amonio cuaternario (200 ppm), ácido peracético o alcohol al 70%**, frota suavemente la superficie para lograr una buena limpieza y desinfección. Deja que el químico actúe como mínimo por un minuto.

4

Para finalizar, aplica abundante agua para retirar residuos y procede a secarla.

Para el **secado**, te recomendamos realizarlo **con aire**, no al sol directo. También puedes **secarla con paños**, solo hazlo con cuidado ya que éstos la pueden rayar fácilmente, provocando dificultad para tu visualización.



Para FJBG ¡tu salud y la de tu familia es lo más importante!

¡JUNTOS SALDREMOS ADELANTE!



FUNDACIÓN
**JUAN
BAUTISTA
GUTIÉRREZ**

Brazo social de Corporación Multi Inversiones